

Dentaurum Group

Germany | Benelux | España | France | Italia |
Switzerland | Australia | Canada | USA
and in more than 130 countries worldwide.

IN

Gebrauchsanweisung | Instructions for use |
Mode d'emploi | Modo de empleo | Modalità d'uso



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE



CE

- Informationen zu Produkten finden Sie unter www.dentaurum.com
- For more information on our products, please visit www.dentaurum.com
- Vous trouverez toutes les informations sur nos produits sur www.dentaurum.com
- Descubra nuestros productos en www.dentaurum.com
- Informazioni su prodotti sono disponibili nel sito www.dentaurum.com

Stand der Information | Date of information | Mise à jour |
Fecha de la información | Data dell'informazione: 01/16

Änderungen vorbehalten
Subject to modifications
Sous réserve de modifications
Reservado el derecho de modificación
Con riserva di apportare modifiche

982-601-20 Printed by Dentaurum Germany 01/16/R1




discovery
pearl

Debonding-Instrument | Debonding instrument |
Instrument de dépose | Instrumento para Debonding |
Strumento per il debonding

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany | Tel. +49 7231/803-0 | Fax +49 7231/803-295
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com

D
DENTAURUM

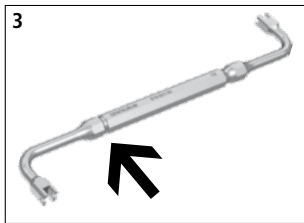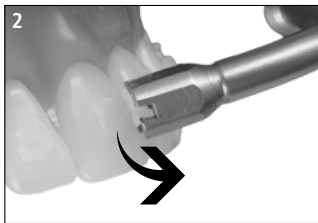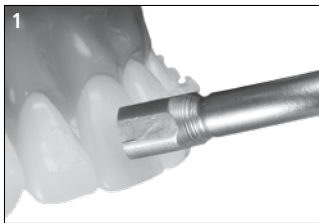

DE

Körperhafte Umfassung des Brackets bis zur Basis.

Ablösen des Brackets durch leichtes seitliches Kippen in Slot- bzw. Bogenverlaufsrichtung.

Abnahme der OK 2er Brackets mit „Rillen-Seite“.

EN

Engage the entire body of the bracket down to the base.

Debond the bracket by tilting it slightly sideways along the horizontal axis.

The "grooved" side is used for debonding brackets from upper laterals.

FR

Bien agripper le bracket jusqu'à la base.

Désolidariser le bracket en faisant un léger mouvement de bascule dans le sens de l'axe horizontale.

Dépose des brackets d'incisives latérales avec le côté « strié ».

ES

Abarcar por completo el cuerpo del bracket hasta la base.

Desprender el bracket mediante ligera inclinación lateral en el slot o en dirección del transcurso del arco.

Desmontaje de los segundos brackets incisivos con el lado "estriado".

IT

Presa in toto del bracket fino alla base.

Rimozione del bracket con una leggera rotazione laterale in direzione dello slot.

Rimozione del bracket laterale superiore con il lato „scanalato“ dello strumento.